

FEBRUARI 2010



INNEHÅLL:

Sidan 1-6	Manuella rullstolar
Sidan 7-8	Elrullstolar, scootrar, drivaggregat & oxygen
Sidan 9-10	Gång- & hygienhjälpmedel
Sidan 11-12	Sängar & personlyftar
Sidan 13-14	Dynor & madrasser

Februari 2010

Manuella rullstolar

Ny länkhjulsupphängning


på Rea™ Spirea²® och Rea™ Spirea³®

Den 1 februari 2010 får Rea™ Spirea²® och Rea™ Spirea³® en uppfräschning när vi inför en ny länkhjulsupphängning.

Den nya länkhjulsupphängningen väger mindre, är höjjusterbar, har snyggare design och infälld skruv. Dessutom är det samma artikel på både höger och vänster sida. Manualen för Spirea-familjen är uppdaterad med den nya länkhjulsupphängningen avseende justering samt tillhörande sitthöjdstabeller.

Länkhjulsupphängningen idag:

Vikt:	285 gram/sida
Funktion:	0, 2, 4, 6 grader
Höjjustering:	Ingen
Höger/Vänster:	Ja
Skruv insida ram:	Utstickande

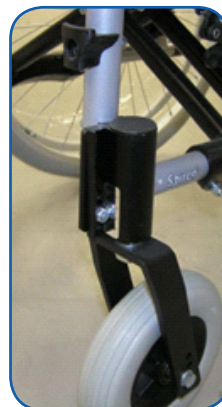

Länkhjulsupphängningen från 1 februari 2010:


Vikt:	205 gram/sida
Funktion:	0, 3, 6 grader
Höjjustering:	25 mm, två fasta lägen
Höger/Vänster:	Nej. Lika på båda sidor
Skruv insida ram:	Infälld



Manuella rullstolar


Nytt chassi med nya möjligheter till Rea™ Azalea®

I maj 2010 uppdateras chassit till Azaleorna. Det som förändras är att det tillkommer en drivhjulposition (A) framåt. Detta för att ge möjlighet att göra stolar med 16" drivhjul mer lättkörda. Utöver förändringen ovan kommer det ett tillägg på tiltfunktionen. Idag finns det

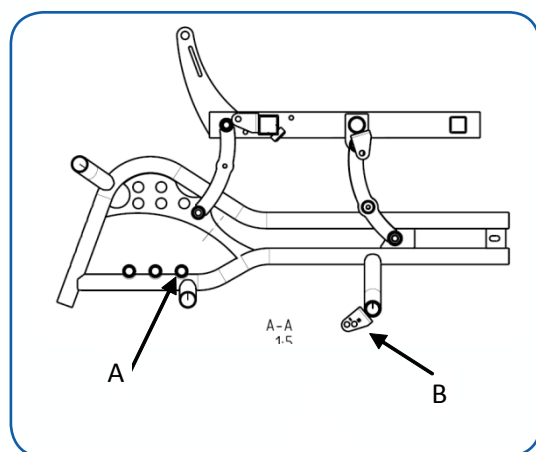

enbart möjlighet att tilta stolen från -1° framåt. I maj 2010 tillkommer en position (B) på chassit och infästningen av tilten. Detta medför att man kan få stolen med start på $+1^\circ$. I och med denna förändring blir det skillnad på tiltspannet. För att kunna använda samma kolv till båda infästningspunkterna har det blivit ett mindre utslag. Som standard är det -1° till $+23^\circ$ och med nya tillvalet $+1^\circ$ till $+25^\circ$. Det går inte att tilta stolen mer än $+25^\circ$, då ryggen tar i chassit.

Vinkelfasta benstöd 80° och 90°

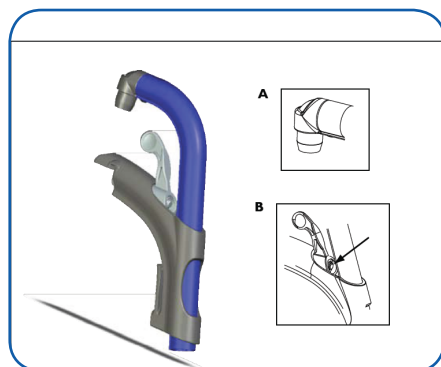

Under april förändras våra vinkelfasta benstödsöverdelar, både 80° och 90° . Infästningen för benstödet (A) har fått en ny design och nytt material av förstärkt plast. Resultatet är ett benstöd med samma funktion och kvalitet som tidigare, men med lägre vikt. En ny fjäder (B) eliminerar det fria spelet när benstödet är placerat på rullstolen. Detta benstöd används på alla rullstolar från Invacare® Rea™.

Februari 2010

Manuella rullstolar

Nya tillbehör till rullstolarna från Invacare® Rea™

Komfortrullstolarna får nytt bålstöd

Bålstöd Swing Away har fått en ny dyna. Bålstöd med den multijusterbara dynan finns redan nu att beställa och fr o m april kommer dynan att finnas med på orderguiderna.


Passar till:
Rea™ Azalea®, Rea™ Bellis®, (Rea™ Assist®)

Vänster
1530457

Höger
1530456

Ny rygg till Rea™ Focus®

Fr o m februari får Rea™ Focus® ett tillskott till sitt breda ryggsortiment. Den befintliga komfortryggen med vinkling med fasta steg har nu fått en variant med gaskolv, vilken är steglös. Till dessa två ryggalternativ kan man välja ryggdynorna Laguna och Passad².

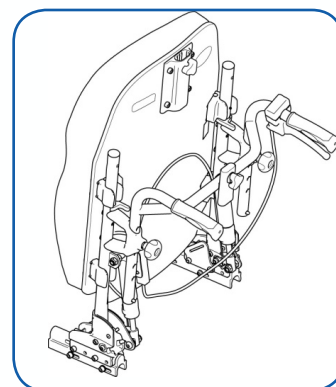

Uppdaterad dokumentation på hemsidan

På vår hemsida finns vår uppdaterade Kompatibilitetskatalog för 2010. I katalogen finns information om vilka tillbehör som passar till vilka modeller, samt vilken kompatibilitet som finns mellan våra produkter. Där finns även annan information, som t ex mått på olika delar och rullstolar. Katalogen täcker alla rullstolar som tillverkas av Invacare® Rea™.

Orderguider

På vår hemsida finns nu uppdaterade orderguider på våra rullstolar.



Februari 2010

Manuella rullstolar

Invacare® Rea™ har en egen hemsida

Nu i februari lanseras den svenska versionen av Invacare® Rea™ s hemsida med massor av information om och kring Rea™ s produkter. Gå in och läs om rullstolarna, både de som tillverkas idag och dem som tillverkades från allra första början.

På hemsidan finns också de nya filmerna om våra komfortrullstolar samt anpassning av dessa. Film 1 handlar om DSS - Dual Stability System. Det är en film som visar på de unika egenskaperna som komfortrullstolar från Invacare® Rea™ erbjuder. Film 2 heter 13 steg, och visar hur man anpassar rullstolen för ett optimalt sittande.


Rea™ har över 50 års erfarenhet av rullstolslösningar och jobbar kontinuerligt med att ta fram nyskapande lösningar. En annan viktig del i Rea™ s utveckling och produktframtagande är hållbarhet och tillförlitlighet.



Välkommen till www.invacare-rea.com/se

Förstärkt ryggstödsvinkling på Küschalls K-serie

Från 1 februari har ryggvinklingen på K-serien förbättrats med ett nytt stag (1) som sticks in i sitsramen. Excentern (2), som används för att vinkla ryggen, har tidigare varit fixerad med en liten skalle på insexskruven. När man skulle lossa denna skruv hände det ofta att man drog skallen rund. Denna skruv är nu ersatt av en insexskruv med cylinderskalle (3).

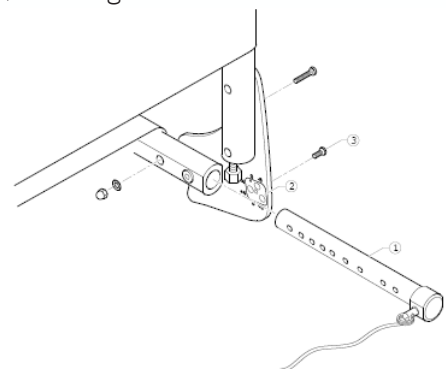


Februari 2010

Manuella rullstolar

Drivhjul förändringar i sortimentet

- Infästningen av drivringarna kommer att ändras så att samma infästning används på alla drivhjul från Invacare® Rea™ . Detta ger en förenkling då alla drivringar monteras lika. Med den nya T-clip infästningen reduceras den totala bredden på rullstolarna med 10 mm. Med den nya infästningen får man möjlighet att ha två olika avstånd mellan drivring och fälg, detta löses med de två olika distanserna.

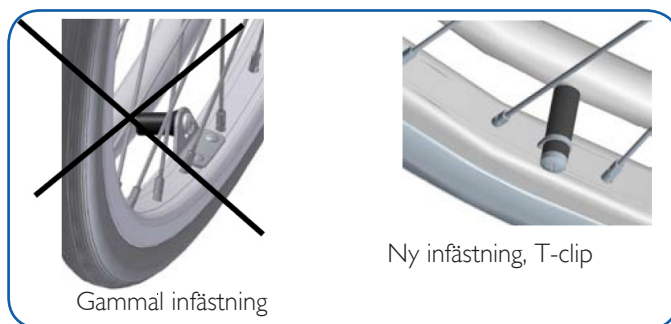

- Aluminiumdrivringen kommer att ändras från en svetsad lösning till en sammanpressad.

Två olika typer av drivhjul

Liksom tidigare erbjuder vi två olika typer av drivhjul med följande skillnader:

- Standarddrivhjul, High End, med aluminiumnav, rostfria ekrar samt med den nya T-clip infästningen.
- Basic drivhjul, med svartlackat stålnav, zinkplätterade ekrar samt med den nya T-clip infästningen.

Manuella rullstolar

Tabell över möjliga standarddrivhjul

	Standard, high end			Standard,high end, VB		Basic	Basic VB
	20"	22"	24"	22"	24"	24"	24"
Drivringar							
Aluminium							
Rostfritt stål							
Plastade							
Geleplastade							
Black Grip							
Utan drivring utan clips							
Däck							
Lågprofil 24x1 1/8							
Lågprofil 24x1							
Finmönstrade							
Grovmönstrade							
Massiva							
Punkteringsfria							

De grönmarkerade kombinationerna är tillgängliga som standard till alla mellanaktiva rullstolar och komfortrullstolar. Med den nya infästningen blir drivhjulet flexibelt då alla drivringar monteras på samma sätt. De rödmarkerade kombinationerna finns inte längre som val på ordreguiderna. Önskas de övriga drivhjulen kan vi erbjuda detta om behov uppstår.

Invacare XLT och XLT Swing samt Invacare SpinX

Drivhjul som Spinergy 25" och 26" samt Sport kommer att finnas kvar, framför allt till XLT och till viss del SpinX. De kombinationer som finns idag med olika däck och drivringar kommer att finnas även fortsättningsvis till XLT och XLT Swing, även på ordreguiderna.

Avtalskonfigurationer

Avtal som är tecknade med de drivringar som utgår som standard berörs inte av denna förändring.

Artikelnummer

De nya drivhjulen kommer att få nya artikelnummer. Utgående artiklar finns som reservdelar i 5 år. Komplette excel-fil med aktuella artikelnummer finns på begäran. Förändringen genomförs under april 2010.

Hälsningar

Lena Åhl


Produktchef Manuella rullstolar

lahl@invacare.com; 070-2057744.

Elrullstolar, scootrar, drivaggregat & oxygen

Nytt manöverboxfäste

Det nya manöverboxfästet passar till de flesta manöverboxar. Fästet kan användas direkt till REM24SD och REM550. En adapter behövs till REM A och REM B liksom för Shark manöverboxar.

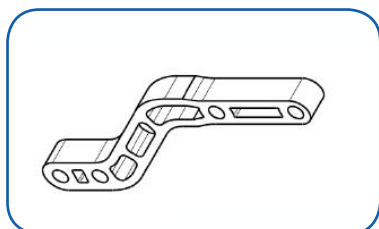

Nytt artikelnummer drifttidsmätare till Orion och Comet

Ett kit innehållande drifttidsmätare, kabelmotstånd och kabelskor har tagits fram för att underlätta eftermontering av drifttidsmätare på Orion & Comet.

Artikelnummer I 533009.

Massiva däck till E-motion M15

De massiva däck som sedan tidigare är kända från E-motion M12 finns nu också som ett alternativ till E-motion M15. De är speciellt tillverkade för att passa E-motions särskilda drivring.



Vid beställning av nya M15 med massiva däck; använd art nr I 466806.

Februari 2010

Elrullstolar, scootrar, drivaggregat & oxygen

Förstärkta kabelanslutningar på Viamobil V15

Sedan slutet av september har drivenheten på Viamobil V15 nya förstärkta kabelanslutningar med böjskydd. Dessa kablar är utsatta för många påfrestningar, t ex när lyftmotor aktiveras, av vibrationer och av skillnader i temperatur under årens lopp. Det nya förstärkta spiralskyddet förbättrar funktionen och tillförlitligheten hos dessa kablar. Höljet till drivenhetens elektronik, som innehåller kablar och anslutningar, kommer från och med nu även att användas i våra servicecenter.



Det händer mycket på produktområde Oxygen. På vår hemsida www.invacare.se uppdaterar vi ständigt dokumentationen till våra oxygenprodukter. Håll utkik efter ny och uppdaterad dokumentation.

Hälsningar

Mikael Forsman

Produktchef Elrullstolar, scootrar, drivaggregat & oxygen

mforsman@invacare.com; 070-5286286.

Februari 2010

Gång- & hygienhjälpmedel

Ny varningstext på Aquatec® Ocean Vip

Aquatec® Ocean Vip från serienummer 51923014108629 är nu utrustad med nya varningstexter.

De nya etiketterna visar korrekt användning av Aquatec® Ocean Vip för att göra hanteringen av stolen lättare och säkrare. De två etiketter som beskriver tiltmekanismen är placerade på baksidan av huvudstödet. De två etiketter som visar hur man korrekt kliver ur stolen är placerade på utsidan av sidorna på Aquatec® Ocean Vip, en på varje sida.

Kryckhållare som standard på Invacare® Banjo

Numera är kryckhållare standard på rollatorn Invacare® Banjo. Nytt artikelnummer är 1452442.

Invacare® Banjo med artikelnummer 1452441 håller för närvarande på att säljas slut och när de är slut i lager tas artikelnumret bort.



Februari 2010

Gång- & hygienhjälpmedel

Ny badbräda

Invacare® Marina och Invacare® Marina L

Fr o m 1 mars 2010 säljer vi vår nya badbräda Invacare® Marina istället för Bali. Marina är enkel att montera och finns i två olika modeller. Både Invacare® Marina och Invacare® Marina L klarar en max brukarvikt på 150 kg.

Marina säljs i 5-pack.

Standardmodellen Marina, har följande mått:

Total längd:	690 mm
Innerlängd:	395 – 630 mm
Art nr:	1525940

Den längre modellen, Marina L, har följande mått:

Total längd:	740 mm
Innerlängd:	420 – 700 mm
Art nr:	1471594



Båda modellerna av Marina klarar en brukarvikt på upp till 150 kg.

Pågående avtal tecknade på Bali pågår till avtalets slut.

Ny färg på gåram Escort

Gåramen Escort byter färg från blå till silver under andra kvartalet 2010.



Hälsningar

Marie-Louise Tham

Produktchef Gång- och Hygienhjälpmedel

mltham@invacare.com; 070-5383380

Sängar & personlyftar

Stöd- och vändhandtag

till EC-sängar

Stöd- och vändhandtagen till EC-sängar kommer från årsskiftet att koncentreras till en modell. Det innebär att Nyköpingsmodellen, gamla EC-modellen samt Gotlandsmodellen kommer att utgå. Stöd- och vändhandtagen kommer endast att finnas i 2 färger av modell med snabbblåsning till EC-sängar. Stöd- och vändhandtagen till Bedco finns kvar som vanligt.

Utgående modeller	Ersätts av
S/v-handtag 25x80 cm 6600935-023 Nyk.	S/v-handtag 25x80 cm snabbblåsning beige 1417510-1015, alu-grå 1417510-0154
S/v-handtag 25x30 cm 6600936-023 Nyk.	S/v-handtag 25x30 cm snabbblåsning beige, 021964.D0, alu-grå 021963-0154
S/v-handtag 40x30 cm 6600934-023 Nyk.	S/v-handtag 40x30 cm snabbblåsning beige 1417511-1015, alu-grå 1417511-0154
S/v-handtag 40x95 cm 6601055-023 Nyk.	S/v-handtag 40x95 cm snabbblåsning beige 1417512-1015, alu-grå 1417512-0154
S/v-handtag 40x30 cm 1450751 Gotland	S/v-handtag 40x50 cm snabbblåsning beige 021963.D0, alu-grå 021963-0154
S/v-handtag 25x80 cm 6600935-02 EC-modell	
S/v-handtag 25x30 cm 6600935-02 EC-modell	
S/v-handtag 40x30 cm 6600934-02 EC-modell	
S/v-handtag 40x95 cm 6601055-02 EC-modell	

Ny färg på polstrade grindskydd

De polstrade grindskydden till sänggrindar har bytt färg från beige till duvblå. Förändringen sker löpande.

Februari 2010

Sängar & personlyftar

Sänggrind Line

En nyhet i vårt sängsortiment är en ny serie integrerade sänggrindar med namnet Line. Linegrinden är tillverkad av aluminium och har låg vikt. Den klarar en madrasshöjd på 18 cm. Den integrerade grinden finns även som steglöst förlängningsbar upp till 220 cm. Sänggrinden Line är opartiskt testad av TÜV och uppfyller de tuffa kraven i den nya standarden.



Ny sängstandard

ISO 60601-2-52

Den nya sängstandarden ISO 60601-2-52 antogs i oktober 2009 och förväntas bli publicerad och officiell under våren 2010.

De stora förändringarna i den nya standarden gäller klämrisk-krav, skärpta krav på sänggrindar beträffande avstånd och maximala utböjningar på grindarna samt öppningar i sängbotten.

Även avstånden mellan fast monterade delar såsom t ex inbördes avstånd mellan stöd- och vändhandtag är nytt. Dessutom skall en säng, även i förlängd version, uppfylla standardens krav.

Standarden blir internationell och slås samman med standarden för sjukhussängar och sängarna delas upp i fem nivåer beroende på användningsområde inom vården.

Hälsningar

Göte Weijmar

Produktchef Sängar & personlyftar


gweijmar@invacare.com; 070-6730709

Februari 2010

Dynor & madrasser

Nya Smart cells - Soft cells till Vicair Academy

I början av februari 2010 kommer Vicair Academy Smart cells att få nytt material och utseende. Fyllnadsgraden, artikelnummer och utseendet på dynan kommer att vara oförändrat, skillnaden är att färgen och materialet i cellerna är mycket mjukare. Detta tack vare ett tunnare och mer följsamt material. Resultatet blir att dynan känns mjukare och mer homogen samt att brukaren automatiskt sjunker ner mer i dynan utan att några celler behöver tas bort. Den nya dynan kommer redan från början att vara anpassad för användning. Ingen justering krävs. Om behov finns att korrigera brukarens position; arbeta målinriktat med att lägga till eller ta bort celler. Se bruksanvisning för rekommendation. Tryckmätning har visat att dynan ger en hög tryckavlastning.

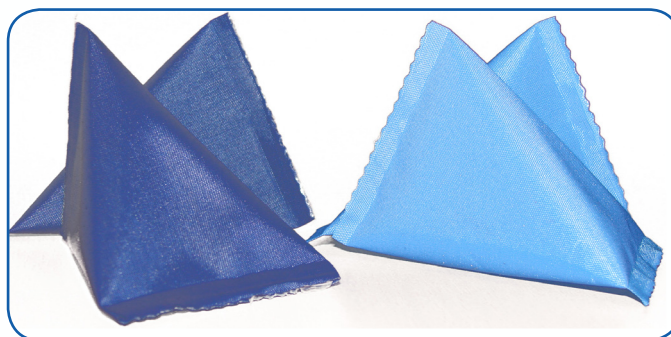

Ny färg på skummet på DaCapo Comfort och DaCapo Comfort Plus

Våra populära madrasser Dacapo Comfort och Dacapo Comfort Plus har fått en ny färg på skummet, som numera har en blå nyans. Ändringen är gjord för att det ska bli lättare att känna igen Waterlilly-miljöskummet i vårt Dacapo-sortiment. Förändringen har ingen som helst inverkan på skummets egenskaper eller dess miljömärkning - den Europeiska blomman.



Februari 2010

Dynor & madrasser

Miljömärkning

Blomman och Svanen gör det enkelt att handla mer miljövänligt. När man köper en miljömärkt produkt har man nämligen garanti för:

- Att produkten är bland de minst miljöbelastande i sitt slag.
- Att kvalitet och funktion är minst lika god som för andra produkter.
- Att hänsyn är taget till hälsan, till exempel att produkten inte innehåller hälsovådliga ämnen.



Håll utkik efter dessa symboler!

Ny design

Vicair Academy Vector

Vicair Academy Vector har fått en ny design. Sektionerna på dynans sidor har delats i två, en främre och en bakre. Den äldre modellen hade en hel längsgående sektion. Förändringen är gjord med tanke på att Vector blir bättre anpassad för optimal positionering av bäckenet respektive lårens placering.

Den äldre modellen är nu nästan helt slut i lager. Den nya versionen är beräknad att börja levereras i början av februari 2010.

Vicair Academy Vector Junior har inte genomgått denna ändring och det bli ingen förändring av befintliga artikelnummer.



Hälsningar

Stina Dahlbeck

Produktchef Dynor & madrasser

sdahlbec@invacare.com; 070-3740750